

# VAGINÁLNÍ TRENAŽÉR PERIFIT KEGEL EXERCISER WITH APP



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátkým stisknutím tlačítka power na základně zapnete a vypnete svůj PERIFIT. Po zapnutí se rozblíká zelená LED dioda.
- 2) Následně spusťte mobilní aplikaci a dále se řiďte jejími instrukcemi. Stáhněte si v Google Play či App Store aplikaci s názvem PERIFIT (aplikace je pouze v angličtině, ale je zcela intuitivní).
- 3) Po instalaci budete potřebovat vytvořit registraci, která je snadná a je zdarma.
- 4) Následně se sama propojí s vaší pomůckou a je hotovo.

### ÚDRŽBA

Po každém použití trenážér opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Trenážér je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na trenážér může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Trenážér je poháněn kvalitním integrovaným jednorázovým akumulátorem, u kterého výrobce uvádí až 10 let používání a poskytuje na něj 5 let záruky!

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vaginální trenážér PERIFIT KEGEL EXERCISER WITH APP.