

INTIMNÍ WELLNESS SILK'N TIGHTRA PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Podržte tlačítko power po dobu 3 vteřin pro zapnutí.
- 2) Zařízení krátce zavibruje a rozsvítí zelenou LED diodu.
- 3) V tuto chvíli se nachází v režimu vnitřního použití.
- 4) Krátkými stisky měníte intenzitu až do úrovně 3.
- 5) Dalším krátkým stiskem se rozsvítí také bílá LED kontrolka a zařízení se přepne na vnější režim použití.
- 6) Také zde můžete krátkými stisky regulovat intenzitu až do úrovně 3.
- 7) Zařízení vypnete podržením tlačítka po dobu 3 vteřin, kdy zavibruje dlouze a vypne LED diody.

POUŽÍVÁNÍ A OMEZENÍ

Každé vnitřní i vnější ošetření trvá 20 minut, doporučeno je pak používat přístroj dvakrát až třikrát týdně po dobu 4-5 týdnů. Poté používejte vždy v případě potřeby a postupně snižujte frekvenci používání.

Vnitřní použití: Naneste malé množství gelu na všechny elektrody. Lehněte si pohodlně, zapněte zařízení a začněte nízkou intenzitou. Vložte rameno do pochvy tak daleko, jak je vám příjemné. Čas od času jím otočte, aby byla zachována vodivost. Můžete zvyšovat intenzitu energie. Udržujte zařízení na místě po dobu 20 minut. Poté se automaticky vypne. Pokud by vám byla vysoká intenzita nepříjemná, restartujte zařízení a začněte znovu na nižším nastavení po celých 20 minut.

Vnější použití: Ujistěte se, že pokožka kolem vagíny je oholená, čistá a suchá. Naneste malé množství gelu na tři chormované elektrody. Lehněte si pohodlně a pro přesnější aplikaci použijte zrcátko. Umístěte elektrodu na stydké pysky a pohybujte zařízením pomalu po pokožce lineárními či krouživými pohyby po dobu 20 minut.

Upozornění: Po ošetření se vyhněte 2 dny velmi horké vodě. Při externím režimu můžete v ošetřované oblasti najít zarudnutí kůže nebo mírný otok, který by měl po sezení zmizet. Nemělo by to trvat déle než 2-5 dní. Pokud zarudnutí do 5 dnů nezmizí, poraďte se se svým lékařem. Přístroj by neměly používat ženy v těhotenství, při kojení, transgender ženy, děti, teenageři ani panny. Nepoužívejte v případě kardiostimulátorů či jiných elektrických implantátů, nepoužívejte s piercingy ani nitroděložním tělískem. Také nepoužívejte pokud trpíte srdečními nemocemi, máte anamnézu rakoviny kůže, onemocnění jater a ledvin, narušený imunitní systém, infekci močových cest, nebo jste v posledních 12 měsících prodělali operaci pánve či jiný zákrok ve vaginální oblasti.

ÚDRŽBA

Před i po každém použití jej otřete vlhkým hadříkem a následně jej suchým hadříkem vysušte. Poté aplikujte **čistič erotických pomůcek**, který ho zbaví bakterií pro vaši bezpečnost. Nepoužívejte hořlavé přípravky s alkoholem.

VODĚODOLNOST

Zařízení není voděodolné a není určeno pro péči ve sprše či ve vaně.

LUBRIKACE

Pro použití a zajištění efektivní vodivosti elektrod musíte vždy použít gel Silk'n Intimate Gel, který je součástí balení. V případě potřeby lze použít také jiný **gel na vodní bázi**. Bez gelu nebude zařízení správně fungovat. Není třeba gel nanášet vnitřně, stačí jej aplikovat na elektrody.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a tmavém místě.

NABÍJENÍ

O nabíjení se postará přiložený USB kabel. První nabití trvá přibližně 6 hodin. Následné nabíjení potom trvá 2 hodiny a v provozu vydrží 30 minut.

OBSAH BALENÍ

Silk'n Tightra, USB kabel pro nabíjení, adaptér pro nabíjecí USB kabel, lubrikační gel a pouzdro na Silk'n Tightra a příslušenství.